



Inalador Nebulizador



Modelo
ULTRANEB
COMPACT



Leia este Manual de Instruções antes de utilizar o seu
Inalador / Nebulizador G-TECH modelo Ultraneb Compact.

MANUAL







INTRODUÇÃO

O Nebulizador G-TECH ULTRANEB COMPACT é indicado para o tratamento das afecções respiratórias das vias aéreas inferiores (brônquios, pulmões), junto com as soluções de nebulização de uso comum.

AVISOS IMPORTANTES

- Não exponha o Nebulizador G-TECH à: temperaturas extremas, umidade, poeira ou luz direta;
- Não o deixe cair e evite vibrações fortes;
- Para evitar infecções e contágios os acessórios não devem ser compartilhados por diferentes indivíduos;
- Não encha a câmara de nebulização acima de 8 ml;
- Não deixe a câmara de nebulização com solução se não estiver utilizando o nebulizador G-TECH;
- Desconecte o nebulizador G-TECH da tomada sempre que ele não estiver em uso;
- Somente utilize o nebulizador G-TECH sobre superfícies estáveis;
- Utilize o nebulizador G-TECH de forma intermitente, ou seja, após 30 minutos descontinue o uso por 30 minutos e caso necessite volte a utilizá-lo por no máximo mais 30 minutos;
- Nunca lave, molhe ou submerja o nebulizador em água ou em outro líquido qualquer. Para limpá-lo siga exatamente as instruções do item MANUTENÇÃO E LIMPEZA deste manual;
- Não o utilize com as mãos molhadas, sob o risco de danos ao nebulizador e ao usuário;
- Não incline o nebulizador, sob risco de vazamento do medicamento e mau funcionamento do próprio nebulizador;
- Crianças não devem utilizar o nebulizador G-TECH sem a supervisão de um adulto;
- Não utilize medicamentos que não sejam prescritos por um médico e sob nenhuma circunstância altere as dosagens de medicamentos por conta própria!
- Siga exatamente as instruções de uso contidas neste manual e não utilize o Nebulizador G-TECH de qualquer forma não descrita neste manual (tais como utilizar acessórios não fornecidos pelo fabricante, inserir objetos ou abri-lo) sob risco de acidentes e da perda da garantia.





DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Tampa



Adaptador de corrente CA (Corrente Alternada)



Adaptador de Acessórios



Acessório Nasal



Adaptador de máscara



Máscara de nebulização pediátrica




Câmara de nebulização



Máscara de nebulização adulto



Filtro de ar

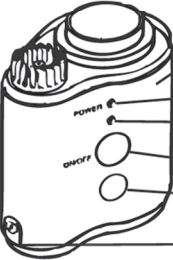

Corpo principal

Led indicador Liga/Desliga

Led indicador modo A.D.R.

Botão Liga/Desliga


Botão modo A.D.R.

Saída para conexão com adaptador de corrente

Acessório opcional: adaptador de corrente



Acessório opcional: adaptador para carro

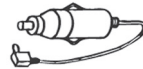



INSTRUÇÕES DE USO

Verifique se todos os componentes do nebulizador estão na caixa.

Montagem

1 - Retire a tampa da câmara de nebulização e coloque a quantidade indicada na bula do medicamento tendo atenção para não ultrapassar o volume máximo da câmara de 8 ml.

2 - Feche a câmara de nebulização.

3 - Conecte na parte superior da câmara de nebulização a máscara de nebulização ou o acessório nasal. Lembrando-se que as máscaras que acompanham o nebulizador são fornecidas em dois tamanhos: infantil e adulto.




4 - Depois de realizada a montagem, conecte o nebulizador G-TECH numa tomada. Note que o led do botão liga/desliga ficará na cor vermelha.

5 - A nebulização começará assim que o botão Liga/Desliga for pressionado. Neste momento o led ficará na cor verde e um timer se iniciará automaticamente e desligará o nebulizador após 4 minutos de uso. Caso queira continuar a nebulização pressione duas vezes seguida o botão liga/desliga. **ATENÇÃO:** tenha certeza de que existe solução de nebulização suficiente na câmara de nebulização antes de reiniciar a nebulização.

6 - Caso ache que o fluxo de ar não esteja de acordo com a necessidade mova a alavanca do regulador de saída de vapor para a esquerda ou para a direita para diminuir ou aumentar o fluxo, respectivamente.

7 - Desligue o nebulizador ao término da nebulização pressionando novamente o Botão Liga/Desliga e desconecte o plugue da tomada.

8 - Limpe os acessórios conforme descrito no item "Manutenção" e somente depois guarde o nebulizador e seus acessórios na caixa.

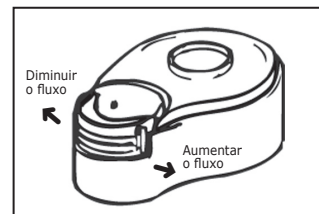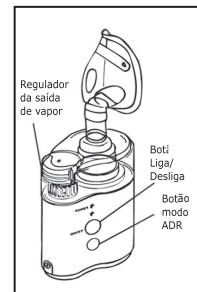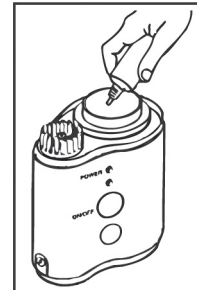

MODO ADR

Modo de Funcionamento intermitente que permite sincronizar o ritmo respiratório do paciente com a frequência de nebulização, garantindo assim o aproveitamento de 100% do medicamento. Para ativá-lo basta pressionar o botão ADR.





FUNÇÃO TIMER

Para assegurar que o uso do nebulizador seja de no máximo 4 minutos, um timer interno será acionado automaticamente sempre que o nebulizador for ligado.

TROCA DO FILTRO DE AR

O filtro de ar deve ser trocado caso esteja sujo ou corroído. Para tal basta seguir as instruções abaixo:

1 - Remova a câmara de nebulização.

2 - Retire o filtro com auxílio de um objeto com ponta e o substitua por um novo.

Observação: O uso de filtro sujo ou de outro material em seu lugar, como por exemplo, o algodão pode danificar o compressor.

MANUTENÇÃO

Antes de utilizar o nebulizador pela primeira vez ou após o seu uso limpe os acessórios com detergente neutro e enxágüe com água morna para retirar resíduos do mesmo. Depois mergulhe os acessórios em uma solução germicida/ desinfetante (pelo tempo que as instruções determinarem) ou numa solução contendo 3 partes de água morna e uma parte de vinagre branco por 30 minutos. Após este tempo, com as mãos limpas, retire os acessórios da solução, enxágüe com água morna e deixe secar ao ar livre sobre folhas de papel absorvente limpas. Limpe as partes externas com um pano seco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Método de nebulização: Vibração ultrasônica

Tensão: 110 V ou 220 V – 60Hz

Consumo: 15W

Capacidade máxima da câmara de nebulização: 8 ml

Diâmetro da partícula: 1,5 – 5,7 (MMAD 3,8 microns)

Fluxo de nebulização: 0,5mL/min.

Frequência Oscilométrica: 2,5 Mhz

Peso: 0,260 Kg

Dimensões: 83,5 x 169 x 60 mm

Temperatura e umidade de operação: 5°C a 40°C; 30% a 95%

Temperatura e umidade de armazenamento: 1°C a 40°C; 10% a 95%

Faixa de pressão atmosférica para transporte e armazenamento: 500 – 1060 mb





ALTERAÇÕES NO FUNCIONAMENTO

Se algum imprevisto ocorrer durante o funcionamento do Nebulizador G-TECH, por favor, verifique a provável causa no quadro abaixo e a respectiva sugestão do que fazer:

Problema	Provável Causa	O que Fazer
O nebulizador não funciona.	O plugue não está bem conectado à tomada.	Reinsira o plugue na tomada.
	Falta de energia elétrica.	Verifique se há energia elétrica na tomada.
Não há saída de solução pela câmara de nebulização ou o fluxo de saída está muito fraco.	Falta solução na câmara de nebulização.	Inserir solução (no máximo 8 ml).
	Excesso de solução.	Retire o volume excedente.
	Filtro de ar obstruído (entupido).	Troque-o por um novo.
	O nebulizador está inclinado.	Corrija a posição do aparelho nebulizador.
O nebulizador funciona por um tempo e logo se desliga.	A função timer está sendo ativada.	Para desativar a função timer pressione duas vezes o botão liga/desliga assim que o nebulizador parar a nebulização.

Observação: caso nenhum destas soluções dê resultados, não tente reparar por si mesmo o nebulizador, pois ao abri-lo perderá a cobertura da Garantia. Encaminhe o Nebulizador G-TECH a um Posto Autorizado de Assistência Técnica.





TERMO DE GARANTIA

O Nebulizador G-TECH modelo ULTRANEB COMPACT tem garantia de 2 anos a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante a apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor.

A garantia de 2 anos não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal, que possuem garantia de 90 dias. Os prazos são contados a partir da data de compra.

A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de uso, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no aparelho por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário.

A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o aparelho defeituoso por outro novo, caso julgue necessário, sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante, após análise técnica. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não o prorrogam. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado separadamente, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

Importado Por:

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpão L - Vila São Sebastião

Duque de Caxias - RJ • CEP: 25055-009

CNPJ: 06.105.362/0001-23

Suporte: 0800 052 1600 • Comercial: 21 2126 1600

E-mail: sac@accumed.com.br

Resp. Técnico: Marcos Eduardo Jordão

CRQ3ªReg.:03212320

Fabricado na Argentina Por: SAN UP S.A.

Registro ANVISA nº: 80275310029

Rev. 04_080411

